



Návod na použitie

Pokyny uvedené nižšie by sa mali používať spolu s podrobnými informáciami na obale

Krátky popis produktu

Nitrilové ochranné rukavice, bez prášku, nesterilné na jednorazové použitie.

Úplný popis produktu

Materiál : nitril

Vonkajší povrch : diamantová textúra

Vnútorňý povrch : polymerizovaný chlór

Manžeta : rolovaná

Farba : čierna

Tvar : obojručný, vhodný na pravú a ľavú ruku

Rozsah veľkostí : S (6–7), M (7–8), L (8–9), XL (9–10), XXL (10–11)

AQL : 1,5

Množstvo v balení : 50 ks

Skladovateľnosť : 3 roky (od dátumu výroby)

Pokyny na skladovanie

Rukavice sa odporúča skladovať v suchu pri teplote 5–35°C a chrániť ich pred priamym slnečným žiarením a žiarivkami.

Udržujte rukavice vo vzdialenosti najmenej 1 m od vykurovacích zariadení, zdrojov ohňa a ozónu.

Neuchovávajte v priamej blízkosti rozpúšťadiel, olejov, palív a mazív.

Kontakt s potravinami

Rukavice sú označené symbolom pre styk s potravinami a spĺňajú požiadavky nariadenia Európskej komisie (ES) č. 2023/2006 o správnej výrobnjej praxi. Rukavice sú vhodné na manipuláciu s akýmkoľvek druhom potravín a boli testované.

Klasifikácia OOP

Rukavice sú osobné ochranné prostriedky kategórie III podľa prílohy II nariadenia 2016/425 a spĺňajú normy: EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016 A1:2018 (Typ B), EN ISO 374-2:2019, EN 16523:2015 A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Certifikát o typovej skúške EÚ vydaný: SATRA (Notified Body Number 2777) Certifikáty typu UKCA vydaný: SATRA (Notified Body Number 0321)

Kontrola vyrobených OOP:

CE 2777 SATRA

Technology Europe Limited.

Bracetown Business Park.

Clonee. D15YN2P.

Republic of Ireland.

UK

CA 8321

SATRA Technology Centre Limited.

Wyndham Way, Telford Way,

Kettering, Northamptonshire,

NN16 8SD, United Kingdom

Vyhlasenie o zhode a návod na použitie s informáciami o dovozcovi sú dostupné na: www.mercatormedical.eu

Bezpečnostné opatrenia a indikácie na použitie

Pred nasadením rukavíc si osušte ruky. Pred použitím skontrolujte, či rukavice nevykazujú chyby alebo nedokonalosti. Ide o jednorazové rukavice. Nedovoľte, aby sa chemické látky dostali pod rukavice cez manžetu. Ak sa chemická látka dostane na pokožku, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody s mydlom. Ak sa rukavice počas používania prepichnú, roztrhnú alebo poškodia, vyzlečte si ich a nasadte si nové. Nepoužívajte rukavice znečistené zvnútra, pretože môžu spôsobiť podráždenie vedúce k zápalu kože alebo vážnejšiemu poškodeniu. Rukavice by sa nemali používať v kontakte s otvoreným ohňom a na ochranu pred akýmkoľvek ostrými nástrojmi. Rukavice nie sú určené na zváranie, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ionizujúcim žiarením alebo pred účinkom horúcich alebo studených predmetov. Táto informácia neodráža skutočnú dobu trvania ochrany na pracovisku a medzi zmesami a čistými chemikáliami. Výsledky degradácie naznačujú zmenu v odolnosti rukavíc proti prepichnutiu po vystavení pôsobeniu chemickej látky. Odolnosť proti prenikaniu chemikálií bola hodnotená v laboratórnych podmienkach zo vzoriek odobratých len z dlane (okrem prípadu, keď je rukavica rovná alebo väčšia ako 400 mm – kde sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa len na testovanú chemikáliu a testovanú vzorku. Môže

to byť iné, ak sa chemikálie používajú v zmesi. Odolnosť proti prieniku bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testovanú vzorku. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmeny fyzikálnych vlastností. Pohyby, zasekávanie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám. Rukavice sú vhodné na špeciálne účely, keďže ide o ochranné rukavice, kde sa riziko poranenia zápästia považuje za minimálne, rukavice sú kratšie ako EN ISO 21420 min. požiadavka na dĺžku.

Komponenty / nebezpečné komponenty

Niektoré rukavice môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou alergie u osôb alergických na ne, u ktorých sa môže vyvinúť kontaktné podráždenie alebo alergická reakcia. V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Likvidácia

Použité rukavice môžu byť kontaminované nakažlivými alebo inými nebezpečnými látkami. Mali by byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Rukavice by mali byť zakopané alebo spálené za kontrolovaných podmienok.

Výrobca

MERCATOR MEDICAL (Thailand)

Ltd. 88/8 Moo 12 Tambon Kampaengphet,

Amphur Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand.

www.mercator.co.

Dovozca

Mercator Medical S.A.

Address: ul. H. Modrzejewskiej 30


31-327 Krakow, Poland

www.mercatormedical.eu

Určené použitie

Jedná sa o nesterilné ochranné rukavice s hrubšími stenami a diamantovou textúrou, ktoré poskytujú vynikajúcu priľnavosť a ochranu pri práci v masťnom a mokrom prostredí. Tieto rukavice sú určené na použitie v prípade potreby ochrany pred nebezpečnými látkami a infekciou. Sú to rukavice odolné voči chemikáliám klasifikované ako osobné ochranné prostriedky kategórie III. Dizajn a označovanie týchto rukavíc zodpovedá požiadavkám nariadenia 2016/425 o osobných ochranných pomôckach a zahŕňa nariadenie o OOP (EÚ) 2016/425, ako bolo zavedené do právnych predpisov Spojeného kráľovstva a zmenené a doplnené ako výrobok kategórie III. Rukavice by sa mali používať výlučne podľa účelu, na ktorý sú určené.

■ Postup navliekania rukavíc

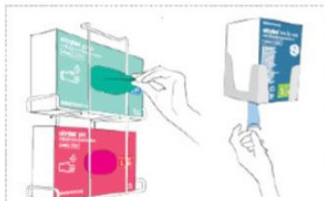

Jednou rukou vyberte rukavicu z obalu tak, že ju budete držať za manžetu.



Držte rukavicu za manžetu a vložte do rukavice druhú ruku bez toho, aby ste sa dotkli pracovnej plochy.



Nasadte si rukavicu.



Teraz použite svoju ruku v rukavici na vybratie druhej rukavice.



Vložte do rukavice druhú ruku a potiahnite.



Hotovo!

■ Ako si zložiť rukavice



Uchopte manžetu rukavice jedným prstom druhej ruky.



Zrolujte rukavicu do polovice ruky.



Chyťte druhú rukavicu v hornej časti manžety.



Pri vyzúvaní rukavíc ich prevráťte naopak.



Uchopte obe rukavice bez toho, aby ste sa dotkli kontaminovaného povrchu rukavíc.



Použitú rukavicu zlikvidujte ako zdravotnícky odpad.

