



Návod na používanie osobných ochranných prostriedkov

Pokyny uvedené nižšie by sa mali používať spolu s podrobnými informáciami na obale.

Krátky popis produktu

Vyšetrovacie nitrilové rukavice, bez prášku, nesterilné, na jednorazové použitie.

Úplný popis produktu

Názov značky : nitrylex classic

Referenčné číslo : RD30309001, RD30309002, RD30309003, RD30309004, RD30309005, RD30309006 : RD30310001, RD30310002, RD30310003, RD30310004, RD30310005, RD30310006

Materiál : nitril

Vonkajší povrch : textúrovaný

Vnútorý povrch : polymerizovaný chlórovaný

Manžeta : rolovaná

Farba : Modrá

Tvar : obojručný, vhodný na pravú a ľavú ruku

Rozsah veľkostí : XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11)

AQL : 1.0 alebo požadované zákazníkom

Množstvo v balení : 100 ks, 200 ks

Skladovateľnosť : 3 roky (od dátumu výroby)

Pokyny na skladovanie

Neuchovávajte v priamej blízkosti rozpúšťadiel, olejov, palív a mazív. Odporúča sa skladovať rukavice na suchom mieste pri teplote 5–35°C a chrániť ich pred priamym slnečným žiarením. Udržujte rukavice vo vzdialenosti najmenej 1 m od vykurovacích zariadení, zdrojov ohňa a ozónu.

Kontakt s potravinami

Rukavice sú označené symbolom kontaktu s potravinami a spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ) č. 10/2011, Európskeho nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia (ES) č. 2023/2006 o správnej výrobnnej praxi. Rukavice sú vhodné na manipuláciu s akýmkoľvek typom potravín a boli testované na celkový test migrácie podľa EN 1186:

Klasifikácia a súlad MD

Rukavice sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy I podľa MDR 2017/745 a spĺňajú normy:

EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2021, EN 1041:2008+A1:2013.

Klasifikácia OOP

Rukavice sú osobné ochranné prostriedky kategórie III podľa prílohy II nariadenia 2016/425 a spĺňajú normy:

EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+ A1:2018 (Type B), EN ISO 374-2:2019, EN16523-1:2015 + A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016.

Typová skúška EÚ (modul B) a priebežná zhoda (modul C2) Notifikovaný orgán: SATRA (Notifikovaný orgán č. 2777)

Kontrola vyrobených OOP:

CE 2777

SATRA Technology Europe Limited.

Bracetown Business Park,

Clonee, Dublin 15

Dublin, Ireland

Vyhlasenie o zhode a návod na použitie s informáciami o dovozcovi sú dostupné na: www.mercatormedical.eu

Zamýšľané použitie

Sú to nesterilné vyšetrovacie a ochranné rukavice na jedno použitie, určené na použitie v oblasti medicíny na: ochranu pacienta a používateľa pred krížovou kontamináciou, vykonávanie lekárskeho vyšetrení, diagnostické a terapeutické postupy a na manipuláciu s medicínsky kontaminovaným materiálom. Rukavice sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy I a ako osobné ochranné prostriedky kategórie III, typ B.

Rukavice určené na ochranu pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a pred škodlivými biologickými látkami.

Rukavice určené na ochranu pred chemickým rizikom podľa EN ISO 374-1:2016 A1:2018 a pred rizikami mikroorganizmov (vírusy, baktérie a plesne) podľa EN ISO 374-5:2016. Ich dizajn a označovanie zodpovedá požiadavkám európskeho

nariadenia 2017/745 o zdravotníckych pomôckach a európskeho nariadenia 2016/425 o osobných ochranných pomôckach. Rukavice by sa mali používať výlučne podľa účelu použitia.

Bezpečnostné opatrenia a indikácie na použitie

Pred vybratím rukavíc z obalu si osušte ruky. Pred použitím skontrolujte, či rukavice nevykazujú chyby alebo nedokonalosti. Na jedného pacienta a jeden zárok použite aspoň 1 pár rukavíc, ide o jednorazové rukavice.

Nedovoľte, aby sa chemické látky dostali pod rukavice cez manžetu. Ak sa chemická látka dostane na pokožku, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody. Ak sa rukavice počas používania prepichnú, roztrhnú alebo poškodia, vyzlečte si ich a nasadte si nové.

Nepoužívajte rukavice znečistené vo vnútri, pretože môžu spôsobiť podráždenie vedúce k zápalu kože alebo vážnejšiemu poškodeniu. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie.

Rukavice by sa nemali používať v kontakte s otvoreným ohňom a na ochranu pred akýmikoľvek ostrými nástrojmi. Rukavice nie sú určené na zváranie, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ionizujúcim žiarením alebo pred účinkom horúcich alebo studených predmetov.

Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach len zo vzoriek odobratých z dlaní (okrem prípadu, kedy je rukavica rovná alebo väčšia ako 400 mm – kde je testovaná aj manžeta) a týka sa iba testovaných chemikálií. Môže to byť iné, ak sa chemikália používa v zmesiach. Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami.

Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zasekávanie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám. Rukavice sú vhodné na špeciálne účely, keďže ide o vyšetrovacie rukavice, pri ktorých sa riziko poranenia zápästia chemikáliami považuje za minimálne. Dĺžka vhodná pre úlohy vyžadujúce ochranu rúk. Minimálna dĺžka rukavíc v súlade s normou EN 455-2.

Komponenty / nebezpečné komponenty

Komponenty používané pri výrobe rukavíc môžu u niektorých ľudí spôsobiť alergické reakcie. Niektoré rukavice môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou alergie pre osoby alergické na ne, u ktorých sa môže vyvinúť kontaktné podráždenie a/alebo alergická reakcia. V prípade alergickej reakcie vyhľadajte lekára.

Dispozícia

S použitými rukavicami by sa malo zaobchádzať ako s kontaminovaným materiálom, preto by sa mali uplatňovať miestne predpisy týkajúce sa likvidácie takýchto materiálov.

MERCATOR MEDICAL (Thailand) Ltd.

88/8 Moo 12 Tambon Kampaengphet,

Amphur Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand.

Autorizovaný zástupca/dovozca

Mercator Medical S.A.


Address: ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Krakow, Poland

www.mercatormedical.eu

MERCATOR

Postup navliekania rukavíc

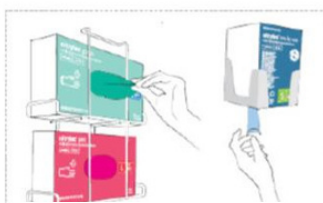

Jednou rukou vyberte rukavicu z obalu tak, že ju budete držať za manžetu.



Držte rukavicu za manžetu a vložte do rukavice druhú ruku bez toho, aby ste sa dotkli pracovnej plochy.



Nasajte si rukavicu.



Teraz použite svoju ruku v rukavici na vybratie druhej rukavice.



Vložte do rukavice druhú ruku a potiahnite.




Hotovo!


Ako si zložiť rukavice



Uchopte manžetu rukavice jedným prstom druhej ruky.

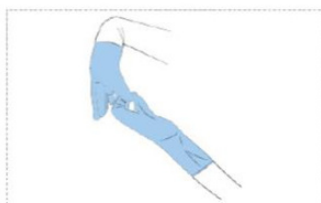

Zrolujte rukavicu do polovice ruky.

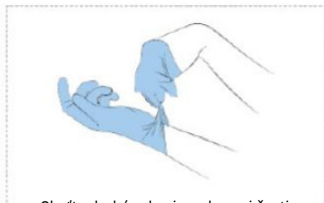

Chyťte druhú rukavicu v hornej časti manžety.



Pri vyzúvaní rukavíc ich prevráťte naopak.



Uchopte obe rukavice bez toho, aby ste sa dotkli kontaminovaného povrchu rukavíc.



Použitú rukavicu zlikvidujte ako zdravotnícky odpad.



Preložené z originálu.

www.xrukavice.sk